



Descripción técnica de producto

Producto Cutimed Sorbact Hydroactive B
Código 700768 - 700767
Laboratorio Keneric



Descripción	Es una espuma de poliuretano antimicrobiana altamente absorbente que contiene 3 agentes activos azul de metileno, violeta genciana y fosfato de plata. Este apósito está indicado para el manejo de heridas de distintos espesores y con exudado moderado a severo
Mecanismo de acción	Los 3 ingredientes activos interactúan para generar un ambiente favorable para la curación de heridas alejando el exudado rico en proteínas, posee propiedades antimicrobianas de amplio espectro (gram + y -) y antifúngicas, reduciendo la carga bacteriana ayudando a prevenir la formación de biopelículas, además tiene efecto analgésico reduciendo considerablemente el dolor gracias a la violeta genciana - No tóxico libre de látex
Recomendaciones de empleo	Para su manipulación se recomienda el uso de técnica limpia o estéril, Se usa como apósito primario (en contacto directo con la lesión), está indicado para heridas exudativas de mediana a gran cuantía, contaminadas, colonizadas e infectadas; no se recomienda emplear en combinación de cremas o pomadas pudiendo verse afectada la acción analgésica y antimicrobiana del apósito - 1ro preparación del sitio de la herida (limpie según protocolo) - 2do mida y corte apósito para que se ajuste a la herida, luego aplique apósito directo sobre la superficie de la herida (que no sobrepase bordes de la herida) - 3ro cubra con apósito secundario no oclusivo - El apósito se puede dejar hasta 3 días dependiendo la cantidad del exudado
Formatos disponibles	Espuma 10x10cm. Espuma 5x5cm.

