



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.4 - 2025

Producto DAPD DIPHOTERINE® 5L (CON BOX)
LAVADO CUERPO COMPLETO

Código 600101



1. Descripción	DAPD DIPHOTERINE® 5L (CON BOX) LAVADO CUERPO COMPLETO
2. Marca	Diphoterine ® Prevor
3. Procedencia	Francia

Características técnicas del producto

La ducha de emergencia química Diphoterine® es una solución de lavado hipertónica, anfótera y polivalente.

Limita la penetración y detiene la agresividad del producto químico, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.

Para la descontaminación de salpicadura de sustancias químicas peligrosas en grandes superficies corporales y hasta el cuerpo completo de superficie del cuerpo como: torso y abdomen, pierna completa, cuerpo completo.

4. Imagen referencial



5. Características específicas	• Dimensiones	64 x 22 x 20 cm
	• Volumen	5 litros
	• Peso	11 kg
	• Contenido	Solución Diphoterine®



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.4 - 2025

	• Plazo de intervención	Máximo 60 segundos
	• Accesorios disponibles	- Incluye Box plástico para protección y fijación mural. - Posibilidad de almacenar en Box anticongelante.
	• Mecanismo de acción	Diphoterine® encapsula, inactiva y lava de manera mecánica el químico de la superficie de los tejidos impidiendo que penetre. Gracias a su hipertonicidad logra extraer el químico que ha penetrado.
	• Uso	La solución Diphoterine® es de un solo uso, el contenido debe ser vaciado por completo para asegurar una correcta descontaminación. <i>*Una vez utilizado, el envase puede ser recargado, esta acción debe ser realizada por el fabricante del dispositivo.</i>
	• Clasificación según MINSAL	Dispositivo medico clase II <i>Regulado por Decreto Supremo N° 825/98 que aprueba el reglamento de control de productos y elementos de uso médico en Chile.</i>
	• Gas propelente	Dióxido de carbono (CO ₂) <i>Clase 2.2-Gas no inflamable según NCh 382/21.</i>
	• Cobertura	Permite la descontaminación de ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes, reductores y alquilantes. <i>*En caso de HF (Ácido Fluorhídrico y sus derivados, utilizar Ducha de emergencia Hexafluorine®)</i>
6. Ventajas	• Ducha autónoma portátil. • Lista para su uso, permite una acción rápida. • Chorro suave, micro-ionizado que permite el lavado. • Tubo largo y flexible que permite un lavado completo del cuerpo entero. • Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. • Transportable. • Uso posible incluso si el DAP está en posición horizontal. • Sin mantenimiento ni instalación particulares; no requiere alimentación, tuberías o válvulas, sin riesgo de fugas. • No es toxico. • Libre de fosfatos. • Solución 100% esterilizada. • Precinto que garantiza la integridad del dispositivo. • Conforme a la norma EN 15154 • Certificación CE.	

7. Protocolo de uso	 Colocarse fuera del peligro  Quitarse la ropa  Lavar lo más rápidamente posible respetando el protocolo de la solución Diphotérine®  Alertar  Obtener una opinión médica
8. Superficie de intervención	• Formato indicado para todo tipo de salpicaduras corporales hasta un cuerpo entero. • Aplicar sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según protocolo. • Usar el contenido completo. • En caso de lavado sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación.  Salpicaduras corporales hasta cuerpo completo Usar 1 DAP 5 litros
DATOS DE CONTACTO	
Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tiendasagita.cl hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587	